

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT IMPORTANLEITUNG

### Indirekter Import via 3Shape Dental System Control Panel

- **Download der Bibliothek:**

laden Sie die aktuelle Z-SYSTEMS Bibliothek (Z-Systems Abutment Library\_) von der offiziellen Z-SYSTEMS Webseite herunter <https://www.zsystems.com/de/download>

- **Öffnen Sie das 3Shape Dental System Control Panel**

- **Navigieren Sie zu:**

Tools  Import/Export  Material importieren

- **Wählen Sie die heruntergeladene Datei "Z-Systems Abutment Library\_". Bestätigen Sie den Import und schliessen Sie anschliessend das 3Shape Dental System Control Panel.**

**Die Bibliothek wurde erfolgreich installiert und enthält folgende Systemkomponenten:**

<b>Artikel</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
Z5-Bone Level	(Z5-BL Abutment und Analog- Verbindung)
Z5-Tissue Level	(Z5-TL Abutment und Analog-Verbindung)