

INSTRUCTIONS D'IMPORTATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Indirekter Import via 3Shape Dental System Control Panel

- **Téléchargement de la bibliothèque :**

téléchargez la bibliothèque Z-SYSTEMS actuelle (Z-Systems Abutment Library_) sur le site officiel de Z-SYSTEMS <https://www.zsystems.com/fr/download>

- **Ouvrir le panneau de contrôle de 3Shape Dental System**

- **Naviguez vers :**

Tools  Import/Export  Material importieren

- **Sélectionner le fichier téléchargé** « Z-Systems Abutment Library_ ». **Confirmer l'importation et fermer le** Control Panel de 3Shape Dental System.

La bibliothèque a été installée avec succès et contient les composants système suivants :

Article	Nom de l'article
Z5-Bone Level	(Z5-BL piliers et connexion analogique)
Z5-Tissue Level	(Z5-TL piliers et connexion analogique)